

Norris^{20/26}CLEAR

Protocolos Iniciales del Usuario - Norris Clear SL

Apertura y Cierre de Brackets

Una herramienta de apertura de brackets transparentes (Clear Bracket Opening Tool #220-5005) más delgada y de un solo extremo funciona de manera óptima para abrir las compuertas de Norris Clear SL. Los abridores estándar actuales son ligeramente demasiado gruesos y no deben usarse. Por favor, evite usar un escariador (scaler) o tirar para abrir la compuerta.

Nota: Las compuertas pueden sentirse ligeramente más rígidas durante el cierre debido a sus ajustadas tolerancias.

✓ APTO PARA USO



✗ NO DEBE USARSE



PASO 1:

Inserte la herramienta de apertura (#220-5005) horizontalmente en la ranura de la compuerta.



PASO 2:

Gire levemente $\frac{1}{4}$ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. No se requiere una vuelta completa.



PASO 3:

Asegúrese de que el arco esté completamente asentado antes de cerrar con el dedo. Evite los alicates Weingart.

ortodoncia10
ORTHODONTICS · USA

Importador Autorizado
DynaFlex
Spain - Portugal & Europe



ortodoncia10.com

+34 950 615 592

+34 624 150 526

Part of **GDO**
GLOBAL DYNAMIC ORTHODONTICS
Since 1986

ORTOBAO

ORTHO
LABORATORIO DE ORTODONCIA

ortodoncia10
ORTHODONTICS · USA

OOA ONLINE
ORTHODONTICS
ACADEMY

Guía de Secuencia de Arcos

FASE	Alineación Inicial	Alineación de Trabajo	Acabado I	Acabado II
ARCO	.014" NiTi	.018" x .018" NiTi	.019" x .025" NiTi Redondeado	.019" x .025" Beta Redondeado
DURACIÓN	10 Semanas	10 Semanas	10 Semanas	8 Semanas o hasta finalizar

Instrucciones Importantes para Brackets Norris Clear

Permita que el arco .014" NiTi se exprese completamente antes de avanzar.

Asegúrese de que el arco .018" x .018" NiTi haya resuelto todas las rotaciones antes de pasar al .019" x .025" NiTi.

El arco máximo recomendado de acero inoxidable es de .017" x .025".

El arco Beta solo debe usarse después de un mes de uso del arco .019" x .025" NiTi.

Reposicionamiento y Descementado Final

Al igual que los brackets metálicos Norris, los brackets Norris Clear tienen una fuerza de adhesión notablemente alta. Utilice el Alicata de Descementado Clear (#216-5025) para el descementado (se proporcionarán instrucciones detalladas). Recuerde cerrar todas las compuertas de los brackets antes del descementado. Asegúrese de eliminar correctamente todo el exceso de resina (flash). El reposicionamiento se realiza de la misma forma que con los brackets metálicos. Se recomienda realizar cualquier reposicionamiento mientras el paciente todavía lleve un arco NiTi para obtener mejores resultados.

Posición del alicate: Ocluso-gingival.



ortodoncia10
ORTHODONTICS · USA

Importador Autorizado
DynaFlex®
Spain - Portugal & Europe



ortodoncia10.com

+34 950 615 592

+34 624 150 526

Part of **GDO®**
GLOBAL DYNAMIC ORTHODONTICS
Since 1986

ORTOBAO

ORTHO
LABORATORIO DE ORTODONCIA
FUNDADO EN 1988

ortodoncia10
ORTHODONTICS · USA

OOA ONLINE
ORTHODONTICS
ACADEMY